

## Eerste ingebruikname MPA (Mobielen Personen Alarm) ;


Laad de MPA **altijd** op voor het eerste gebruik.

Leg de desbetreffende MPA eerst aan de oplader, het apparaat gaat hierdoor automatisch aan.

Opladen kan door het apparaat in het meegeleverde oplaadstation te zetten en de stekker in het stopcontact te doen. Pas als het rode lampje op het oplaadstation brand, laat het apparaat goed op.

Plaats de oplader op een voor u handige plaats. Afhankelijk van de situatie worden twee plekken in huis aangeraden:

1. U gebruikt de MPA alleen buitenshuis. Plaats de oplader dan in de buurt van de voordeur of bijvoorbeeld bij uw sleutels. U wordt dan automatisch herinnerd dat u de MPA moet meenemen. Komt u thuis, plaats dan direct de MPA weer in de oplader, zo is de MPA altijd vol wanneer u het huis verlaat.
2. U gebruikt de MPA binnen- en buitenshuis. Plaats de oplader naast uw bed op het nachtkastje en laad deze 's nachts op. Bent u het val gevaarlijkst in de nacht? Plaats de oplader dan op een centrale plek in het huis en laad de MPA op, op een moment wanneer u het veiligst bent. Bijvoorbeeld als de zorg of uw familie aanwezig is.

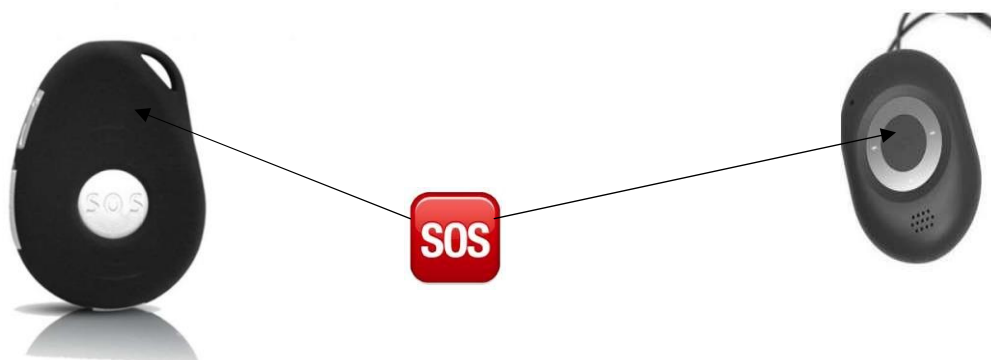

**Alarmeren met de MPA (Mobielen Personen Alarm):** U maakt een alarm door 3 seconden op de grote SOS-knop te drukken. U hoort nu een korte piep toon en voelt een trilsignaal. De meldkamer neemt nu contact met u op via het toestel, waarmee u op afstand kunt spreken en luisteren. Bij geen reactie worden uw contactpersonen ingeschakeld. De MPA werkt als een eenvoudige mobiele telefoon en beschikt over een grote ronde 'SOS' knop. Bent u in nood, de weg kwijt of gevallen? Met één druk op de SOS-knop wordt er een noodsignaal naar een contactpersoon of de alarmcentrale verstuurd. Uw locatiegegevens worden meegestuurd zodat zij gelijk kunnen zien waar u zich bevindt om u direct te kunnen helpen. Na een noodsignaal wordt er automatisch contact met u opgenomen en kunt u via de spreek- luisterverbinding communiceren met uw contactpersoon of de centralist van de alarmcentrale. Uw locatiegegevens worden meegestuurd zodat zij gelijk kunnen zien waar u zich bevindt om u direct te kunnen helpen.