

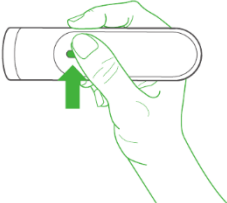
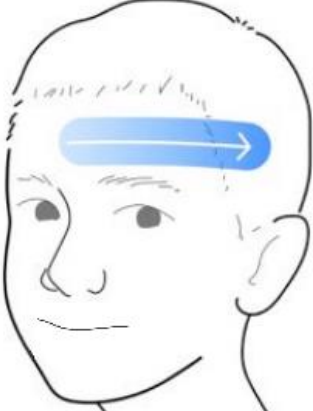
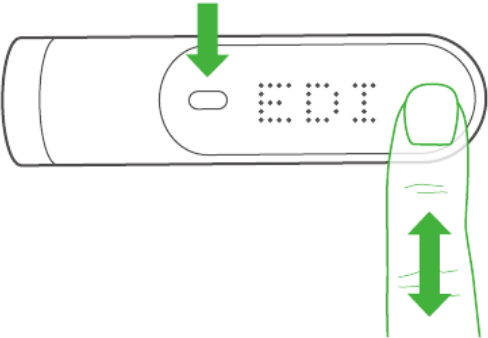
Handleiding Thermometer Withings

Volgt u de volgende stappen om een temperatuurmeting uit te voeren.

Heeft u eigen wifi, volgt u dan eerst de stappen onder het kopje 'wifi instellen' op de volgende pagina.

Is er een Wifi-punt meegeleverd, dan is de thermometer klaar voor gebruik.

Meting uitvoeren

	<p>Druk op de knop om de Thermometer te activeren</p>
	<p>Begin op het midden van het voorhoofd en beweeg in een horizontale rechte lijn richting het haar.</p> <p>De thermometer trilt wanneer de meting gelukt is</p>
	<p>Indien er meerdere gebruikers zijn, swipe met je vinger om de juiste gebruiker te selecteren</p> <p>Bevestig met de knop op de thermometer</p>

Wifi instellen

	<p>Wifi instellen</p> <p>Ga op een Mobiel apparaat naar thermo.withings.com en download de applicatie.</p> <p>Log in met de meegeleverde gegevens.</p> <p>Volg de stappen en koppel aan de wifi.</p>
--	--